

BETRIEBSANWEISUNG

Umgang mit Pflegewannen



Anwendungsbereich

Diese Betriebsanweisung gilt für den Umgang mit Pflegewannen.

Gefahren für Mensch und Umwelt



Gefahren für den Menschen

- Sturzgefahr für den Patienten bei defekten Aufstehhilfen oder falscher Benutzung.
- Gefahr durch elektrische Spannung.
- Rutschgefahr durch Feuchtigkeit.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Technische Schutzmaßnahmen

- Verwenden Sie ausschließlich einwandfreie Geräte und original Zubehör.
- Die Pflegewanne darf nur bei sicheren Stand benutzt werden.



Organisatorische Schutzmaßnahmen

- Jeder Anwender ist anhand der Gebrauchsanweisung in die sichere Bedienung einzuleiten.
- Lassen Sie den Benutzer/in nicht unbeaufsichtigt.
- Gleichzeitige Benutzung von Pflegewanne und anderen elektro Geräten (z.B. Föhn) ist verboten.



Persönliche Schutzmaßnahmen

- Beachten Sie den Hautschutzplan.
- Reinigen, desinfizieren und pflegen Sie Ihre Hände regelmäßig.

Verhalten bei Störungen

Bei besonderen/ungewöhnlichen Ereignissen

- Bei Auffälligkeiten ist das Gerät auserbetrieb zu nehmen und der nächste Vorgesetzte zu informieren.

Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe



Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort

- Selbstschutz beachten; Anlage abschalten; Verletzte bergen.
- Verbrennungen kühlen, verletzte Gelenke ruhigstellen.
- Den Verletzten beruhigen; Ersthelfer hinzuziehen.
- Die Unfallstelle sichern; der nächste Vorgesetzte ist zu informieren.
- **Ruhe bewahren!**



Notruf: 112

Ausbildete Ersthelfer:

Erste-Hilfe-Leistungen müssen in das Verbandbuch eingetragen werden.

Instandhaltung; Entsorgung

Wartung

- Wartungsarbeiten dürfen nur von Fachpersonal vorgenommen werden.
- Reinigen Sie die Wanne nach der Benutzung.

Folgen der Nichtbeachtung

Ersteller

Rechtliche Folgen

Die Nichtbeachtung kann juristische Folgen haben.

Das Nichtbeachten dieser Anweisung ist ein Verstoß gegen gegebene Weisungen und wird entsprechend geahndet.

Ersteller

Datum: 15.03.2019

Nr.: MW170222-03

Seite: 2 von 2

Wählerstimmen

Vorladungstermin: 15.03.2019