

	Handbuch Qualitätsmanagement	Kap. D.4.3.6
	Absauggerät	

Gerätename/Typ: ..... Inventar Nr.: ..... Standort: .....

Einsatz am Bewohner am:	Funktionsüberprüfung vor Gebrauch am : Datum und Hdz.	Zurück am:	Fingertip gewechselt am: durch MA/ Hdz.:	Filterwechsel am: durch MA/ Hdz.:	Funktionsüberprüfung am : Datum und Hdz.

**Funktionsüberprüfung vor jeder Inbetriebnahme durch Anwender:**

1. Sichtkontrolle auf äußere Beschädigung	6. Prüfung ob Sekretflasche beschädigt ist; wenn ja, austauschen
2. Prüfung, ob Absauggerät und die Bestandteile gereinigt und desinfiziert sind	7. Absauggerät einschalten am Ein-/ Ausschalter
3. Prüfung, ob Filter und die Ventilkugel eingebaut sind und ob Ventilkugel beweglich ist.	8. Fingertip vorne mit einem Finger verschließen. Es muss das max. Vakuum von ca. 0,75 bar erreicht werden. Bedienungsanleitung beachten
4. Filter bei Verschmutzung sofort wechseln oder Filterwechsel	9. Am Regler das notwendige Vakuum für das Absaugen einstellen
5. Filter bei Verschmutzung sofort wechseln oder Filterwechsel: <b>Absaughäufigkeit:</b> 3x tgl. oder mehr 2x tgl. oder weniger	10. <b>Fingertip ist nicht zur Wiederverwendung bestimmt</b>
	11. 1x jährlich Wartung durch Lieferant
<b>Austauschintervall:</b> 1x / monatlich 1x in 6 Monaten	

Freigabe GF	Geprüft	Bearbeiter	Version	Datum	Seite
Frau Busch	QMB	QMB	QMH 2.0	Oktober 2025	Seite 1 von 1