

Evangelische Altenhilfe Ludwigshafen am Rhein  
gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH



... sicher und geborgen

# Handbuch Qualitätsmanagement

## Prüfung Funkfinger

Kap.  
D.4.2.3

Die Funkfinger der Bewohner, sind alle 3 Monate auf Funktionalität zu prüfen.

Ist ein Batteriewechsel notwendig, wird bei Rufauslösung nicht nur ein Ruf ausgelöst, sondern gleichzeitig ein Steckerwurf. Dies ist erkennbar, dass die Zimmeraußenlampe rot leuchtet und gleichzeitig gelb blinkt. In diesem Fall sollte die Batterie zeitnah getauscht werden.

Hierfür ist das Batteriewechselset der Winkel GmbH (5020-0002-2000) zu verwenden. Wechselseits werden über die Firma Symbicom bezogen und ausschließlich durch die Mitarbeiter der Haustechnik gewechselt.

| Freigabe GF | Geprüft | Bearbeiter | Version | Datum        | Seite         |
|-------------|---------|------------|---------|--------------|---------------|
| Frau Busch  | QMB     | QMB        | 2.0     | Oktober 2025 | Seite 1 von 1 |