

	Handbuch Qualitätsmanagement	Kap. D.4.3.5
	Sauerstoffkonzentrator	

Gerätename/Typ: Inventar Nr.: Standort:

Einsatz am Bewohner am:	Funktionsüberprüfung vor Gebrauch am : Datum und Hdz.	Gereinigt und Desinfiziert zurück am: Datum und Hdz.	Funktionsüberprüfung am : Datum und Hdz.	Filterwechsel am: durch MA/ Hdz.:	Respiflo gewechselt am: durch MA/ Hdz.:

Funktionsüberprüfung vor jeder Inbetriebnahme durch Anwender:

1. Sichtkontrolle auf äußere Beschädigung	6. Netzausfall – Alarm überprüfen. Hierzu Netzstecker ziehen.
2. „Respiflo“ ist nicht länger als 5 Wochen am Gerät (Datum beachten)	7. Netzstecker wieder in Steckdose stecken. Der Alarm muss ausgehen
3. Luftansaugschlitze sind wöchentlich mit Pinsel gereinigt	8. Gerät am Hauptschalter ausschalten
4. Sauerstoffkonzentrator in Betrieb nehmen. Danach: <ul style="list-style-type: none"> • leuchtet die Betriebsanzeige grün • die Störungsanzeige kurzzeitig rot • es ertönt ein kurzes akustisches Signal 	9. 1x jährlich Wartung durch Lieferant
5. Flow von 2 l/ Min. am Drehknopf für Sauerstoff einstellen	

Freigabe GF	Geprüft	Bearbeiter	Version	Datum	Seite
Frau Busch	QMB	QMB	QMH 2.0	Oktober 2025	Seite 1 von 1